




Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um den FRx einzuschalten.

**SCHRITT 1: DRÜCKEN SIE DIE GRÜNE EIN-/AUS-TASTE**

Drücken Sie die grünen Ein-/Aus-Taste .


Der FRx weist Sie an, die Kleidung vom Brustkorb des Patienten zu entfernen. Falls notwendig, reißen oder schneiden Sie die Kleidung auf, um den Brustkorb des Patienten zu entblößen.

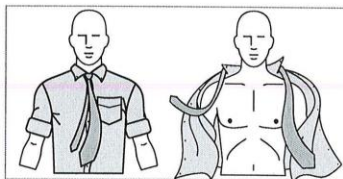

**SCHRITT 2: BEFOLGEN SIE DANN DIE SPRACHAUFFORDERUNGEN DES FRx**

Nehmen Sie die SMART Pads II Elektrodenbox aus der Tragetasche. Reinigen und trocknen Sie die Haut des Patienten und rasieren Sie ggf. übermäßige Behaarung, um guten Elektrodenkontakt mit der bloßen Haut zu gewährleisten.

Öffnen Sie die Elektrodenbox wie unten gezeigt. Ziehen Sie eine Elektrode ab.

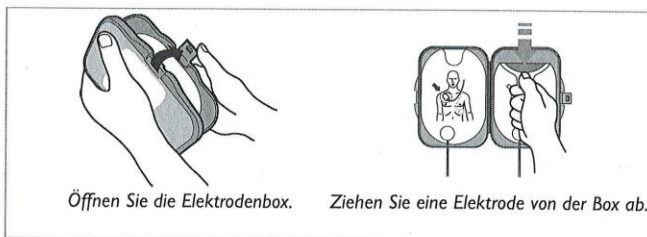


Öffnen Sie die Elektrodenbox.

Ziehen Sie eine Elektrode von der Box ab.



Elektrodensymbol blinkt.

Die Elektrodenposition ist sehr wichtig. Die Symbole auf dem Diagramm für die Platzierung der Elektroden (auf der Vorderseite des FRx) blinken, um Ihnen zu helfen. Bringen Sie die Elektrode *genau* wie in der folgenden Abbildung gezeigt auf der Haut des Patienten an. Drücken Sie den selbstklebenden Teil der Elektroden fest auf. Wiederholen Sie dies mit der anderen Elektrode.

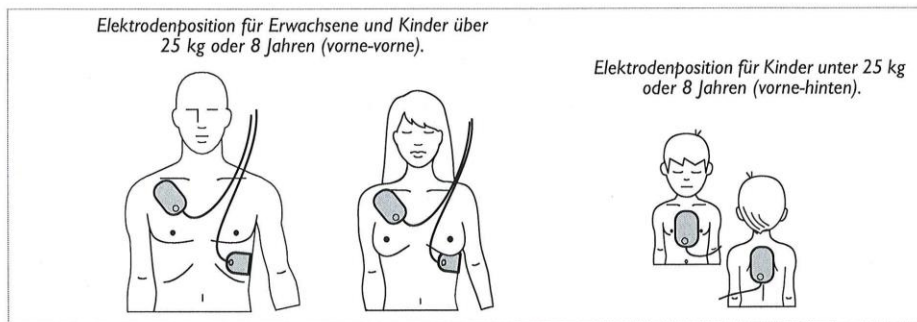

**SCHRITT 3: DRÜCKEN SIE DIE BLINKENDE ORANGEFARBENE SCHOCKTASTE, WENN SIE DAZU AUFGEFORDERT WERDEN**

Sowie der FRx feststellt, dass die Elektroden am Patienten angelegt sind, erlischt das Elektrodensymbol. Der FRx leitet die Analyse des Herzrhythmus des Patienten ein. Das Gerät weist darauf hin, dass der Patient nicht berührt werden darf. Zur Erinnerung beginnt die Warnlampe zu blinken.



*Falls ein Schock erforderlich ist:*

Die Warnlampe hört auf zu blinken und bleibt erleuchtet. Die orangefarbene Schocktaste beginnt zu blinken. Der FRx weist Sie an, die orangefarbene Schocktaste zu drücken. Sie müssen die Schocktaste drücken, damit ein Schock ausgelöst wird. Achten Sie unbedingt darauf, dass der Patient nicht berührt wird, wenn Sie die Taste drücken. Wenn Sie die Schocktaste drücken, teilt Ihnen der FRx mit, dass ein Schock ausgelöst wurde. Dann analysiert er automatisch den Herzrhythmus des Patienten, um zu ermitteln, ob ein weiterer Schock erforderlich ist.



*Falls kein Schock erforderlich ist:*

Die blaue i-Taste leuchtet auf und zeigt an, dass der Patient berührt werden darf. Gegebenenfalls wird vom FRx darauf hingewiesen, dass eine Herz-Lungen Wiederbelebung durchgeführt werden muss. (Wenn keine Herz-Lungen Wiederbelebung erforderlich ist, weil sich der Patient beispielsweise bewegt oder er das Bewusstsein wieder erlangt, halten Sie sich an die örtlichen

Vorschriften, bis Rettungsdienst-personal eintrifft.) Der FRx bietet Ihnen daraufhin an, die blinkende blaue i-Taste für Herz-Lungen Wiederbelebung-Anweisungen zu drücken.

*Für Herz-Lungen Wiederbelebung-Anweisungen:*

Drücken Sie die blinkende blaue i-Taste während der ersten 30 Sekunden der Pause für die Patientenbehandlung um die Herz-Lungen Wiederbelebung-Anweisungen zu aktivieren.\* (Wenn der Kinderschlüssel eingelegt ist, bietet der HeartStart Herz-Lungen Wiederbelebung-Anweisungen speziell für Kinder.) Wenn die Pause vorbei ist, fordert der Defibrillator Sie dazu auf, die Herz-Lungen Wiederbelebung anzuhalten, damit er den Herzrhythmus des Patienten analysieren kann. Die durch Herz-Lungen Wiederbelebung verursachte Bewegung kann die Analyse beeinträchtigen. Vermeiden Sie also jegliche Bewegung, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

